

Bevezető

A Windows 95 OSR2, 98 és ME operációs rendszerre való telepítéshez az operációs rendszer installációs lemezei vagy CD-je szükséges.

Az IrDA meghajtó telepítésének lépései Windows 95 OSR2 esetén

- Kapcsolja ki a PC-t.
- Csatlakoztassa az infraportot egy szabad soros porthoz.
- Indítsa el a számítógépét.
- Indítsa el a Start menu/Beállítások/Vezérlőpult/Új hardver hozzáadása varázslót.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- Válassza „Nem” opciót, azaz ne a Windows keresse az új hardvert.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- A megjelenő eszközlístából válassza ki az „Infravörös” eszközt.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- Válassza ki a „Gyártók” alatt az „ACTiSYS” bejegyzést, a „Modellek” alatt pedig az „ACT-IR200L” sort.
- Nyomja meg az „OK” gombot.
- Állítsa be azt a fizikai soros portot, melyhez az infravörös eszközt csatlakoztatta (COM1, COM2).
- Nyomja meg a tovább gombot.
- A következő ablakon válassza az „Alapértelmezett port (ajánlott)” opciót.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- Nyomja meg a befejezés gombot.
- Indítsa újra számítógépét.

Az infravörös port sebességének állításához indítsa el az Infravörös monitort a Start menü/Beállítások/Vezérlőpult-ból. Válassza a „Beállítás” fület, jelölje meg az „Infravörös kommunikáció a következő porton” pontot ha az nincs megjelölve, továbbá jelölje meg a „Adatátviteli sebesség korlátozása” pontot és állítsa be ennek értékét 19,2 kbps-re. Az aktualizáláshoz nyomja meg az „OK” gombot. Lépjen ki az Infravörös monitor programból.

Az IrDA meghajtó telepítésének lépései Windows 98 esetén

- Kapcsolja ki a PC-t.
- Csatlakoztassa az infraportot egy szabad soros porthoz.
- Indítsa el a számítógépét.
- Indítsa el a Regedit.exe nevű programot a C:\Windows könyvtárból és keresse meg az EnablePowerManagement értéket a HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VCOMM bejegyzésnél. Kattintson az egérrel kétszer az EnablePowerManagement sorra és módosítsa az első bájtot „01”-ről „00”-ra. Lépjen ki a programból és indítsa újra a számítógépet.
- Indítsa el a Start menu/Beállítások/Vezérlőpult/Új hardver hozzáadása varázslót.
- Nyomja meg a tovább gombot és ezt ismételje amíg meg nem jelenik egy „Nem, egy listáról akarom kiválasztani a telepíteni kívánt eszközt” opció.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- A megjelenő eszközlístából válassza ki az „Infravörös eszközök”-et.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- Válassza ki a „Gyártók” alatt az „(Infravörös COM port vagy dongle)” bejegyzést, a „Modellek” alatt pedig az „(Általános infravörös soros port vagy dongle)” sort.
- Nyomja meg az „OK” gombot.
- A megjelenő listában válassza az „(Általános infravörös soros port vagy dongle)” eszközön belül az „ACTiSYS 200L” típust.
- Nyomja meg a tovább gombot.

- Állítsa be azt a fizikai soros portot, melyhez az infravörös eszközt csatlakoztatta (COM1, COM2).
- Nyomja meg a tovább gombot.
- A következő ablakon válassza az „Alapértelmezett portok használata (ajánlott)” opciót.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- Nyomja meg a befejezés gombot.
- Indítsa újra számítógépét.

Az infravörös port sebességének állításához indítsa el az Infravörös monitort a Start menü/Beállítások/Vezérlőpult-ból. Válassza a „Beállítás” fület, jelölje meg az „Infravörös kommunikáció a következő porton” pontot ha az nincs megjelölve, továbbá jelölje meg a „Adatátviteli sebesség korlátozása” pontot és állítsa be ennek értékét 19,2 kbps-re. Az aktualizáláshoz nyomja meg az „OK” gombot. Lépjen ki az Infravörös monitor programból.

Az IrDA meghajtó telepítésének lépései Windows ME esetén

- Kapcsolja ki a PC-t.
- Csatlakoztassa az infraportot egy szabad soros porthoz.
- Indítsa el a számítógépét.
- A Windows ME rendszerlemezén keresse meg az „Irdasir.reg” fájlt és indítsa el az egér kétszeri kattintásával. A fájlt megtalálja a „TOOLS\PSSUTIL” könyvtárban.
- Indítsa újra számítógépét.
- Indítsa el a Regedit.exe nevű programot a C:\Windows könyvtárból és keresse meg az EnablePowerManagement értéket a HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VCOMM bejegyzésnél. Kattintson az egérrel kétszer az EnablePowerManagement sorra és módosítsa az első bájtot „01”-ről „00”-ra. Lépjen ki a programból és indítsa újra a számítógépet.
- Indítsa el a Start menu/Beállítások/Vezérlőpult/Új hardver hozzáadása varázslót.
- Nyomja meg a tovább gombot és ezt ismételve amíg meg nem jelenik egy „Nem, egy listáról akarom kiválasztani a telepíteni kívánt eszközt” opció.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- A megjelenő eszközlístából válassza ki az „Infravörös eszközök”-et.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- Válassza ki a „Gyártók” alatt az „(Infravörös COM port vagy dongle)” bejegyzést, a „Modellek” alatt pedig az „(Általános infravörös soros port vagy dongle)” sort.
- Nyomja meg az „OK” gombot.
- A megjelenő listában válassza az „(Általános infravörös soros port vagy dongle)” eszközön belül az „ACTiSYS 200L” típust.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- Állítsa be azt a fizikai soros portot, melyhez az infravörös eszközt csatlakoztatta (COM1, COM2).
- Nyomja meg a tovább gombot.
- A következő ablakon válassza az „Alapértelmezett portok használata (ajánlott)” opciót.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- Nyomja meg a befejezés gombot.
- Indítsa újra számítógépét.

Az infravörös port sebességének állításához indítsa el az Infravörös monitort a Start menü/Beállítások/Vezérlőpult-ból. Válassza a „Beállítás” fület, jelölje meg az „Infravörös kommunikáció a következő porton” pontot ha az nincs megjelölve, továbbá jelölje meg a „Adatátviteli sebesség korlátozása” pontot és állítsa be ennek értékét 19,2 kbps-re. Az aktualizáláshoz nyomja meg az „OK” gombot. Lépjen ki az Infravörös monitor programból.

Az IrDA meghajtó telepítésének lépései Windows 2000 esetén

- Kapcsolja ki a PC-t.
- Csatlakoztassa az infraportot egy szabad soros porthoz.
- Indítsa el a számítógépét.
- Indítsa el a Start menü/Beállítások/Vezérlőpult/Hardver hozzáadása, eltávolítása varázslót.
- Nyomja meg a tovább gombot.
- A feladatválasztásnál jelölje be az „Eszköz hozzáadása/hibaelhárítása” opciót, majd nyomja meg a tovább gombot.
- A számítógépe néhány másodpercig keresni fogja az új hardvert..
- A hardvereszköz kiválasztása ablakban keresse meg az „Új eszköz hozzáadása” sort, jelölje ki és nyomja meg a tovább gombot.
- Az új hardver keresésénél válassza a „Nem, én szeretném kiválasztani a hardvert listából” pontot, majd nyomja meg a tovább gombot.
- A megjelenő listából válassza ki az „Infravörös eszközök” sort és nyomja meg a tovább gombot.
- Válassza ki a „Gyártók” alatt az „ACTiSYS” sort az „Infravörös eszköz” alatt a „ACTiSYS IR-200L soros infravörös eszköz”-t majd nyomja meg a tovább gombot.
- A hardver telepítés indításához nyomja meg a tovább gombot.
- Állítsa be azt a fizikai soros portot, melyhez az infravörös eszközt csatlakoztatta (COM1, COM2).
- Nyomja meg a befejezés gombot.
- Indítsa újra számítógépét.

Az infravörös port sebességének állításához válassza a Start menü/Beállítások/Vezérlőpult/Rendszer/Hardver/Eszközkezelő/Infravörös eszközök/ACTiSYS IR-200L Infravörös eszköz sort, kattintson kétszer az egerrel és a megjelenő tulajdonságok ablakban válassza az IrDA beállításokat. A megjelenő két listában állítsa be azt a fizikai soros portot, melyhez az infravörös eszközt csatlakoztatta (COM1, COM2) és állítsa a sebesség értékét 19200-ra. A befejezéshez nyomja meg az OK gombot.

Az IrDA meghajtó telepítésének lépései Windows XP esetén

- Kapcsolja ki a PC-t.
- Csatlakoztassa az infraportot egy szabad soros porthoz.
- Indítsa el a számítógépét.
- Indítsa el a Start menü/Vezérlőpult/Hardver hozzáadása varázslót. (Klasszikus Start menü beállításnál a Start menü/Beállítások/Vezérlőpult...)
- Nyomja meg a tovább gombot.
- A számítógépe néhány másodpercig keresni fogja az új hardvert...
- Jelölje be az „Igen már csatlakoztattam a hardvereszközt” opciót, majd nyomja meg a tovább gombot.
- A megjelenő ablakban keresse meg az „Új hardvereszköz hozzáadása” sort, jelölje ki és nyomja meg a tovább gombot.
- Jelölje ki a „Telepítse a hardvereszközt, amit a listából választok ki” opciót, majd nyomja meg a tovább gombot.
- A megjelenő listából válassza ki az „Infravörös eszközök” sort és nyomja meg a tovább gombot.
- Válassza ki a „Gyártók” alatt az „ACTiSYS” sort az „Modellek” alatt a „ACTiSYS IR-200L soros infravörös eszköz”-t majd nyomja meg a tovább gombot.
- A hardver telepítés indításához nyomja meg a tovább gombot.
- Állítsa be azt a fizikai soros portot, melyhez az infravörös eszközt csatlakoztatta (COM1, COM2).
- Nyomja meg a befejezés gombot.
- Indítsa újra számítógépét.

Az infravörös port sebességének állításához válassza a Start menü/Vezérlőpult/Rendszer/Hardver/Eszközkezelő/Infravörös eszközök/ACTiSYS IR-200L soros infravörös eszköz sort, kattintson kétszer az egérrel és a megjelenő tulajdonságok ablakban válassza az IrDA beállításokat. A megjelenő két listában állítsa be azt a fizikai soros portot, melyhez az infravörös eszközt csatlakoztatta (COM1, COM2) és állítsa a sebesség értékét 19200-ra. A befejezéshez nyomja meg az OK gombot.

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze, hogy sikeres volt –e a telepítés és jó típust (ACTiSYS 200L) adott –e meg.
- Ellenőrizze, hogy a telepítéskor megadott soros portra csatlakoztatta –e az infra eszközt.
- Ellenőrizze, hogy az adott soros portot nem használja–e másik alkalmazás, pl. modem driver. Ha igen távolítsa el minden – azt a portot használó - eszközt a windows -ból és telepítse újra az IrDA meghajtót.