

## USB IrDA adapter telepítése

Az IrDA adapter telepítéséhez kérjük, kövesse a következő lépéseket.

*Fontos! Kérjük, ne csatlakoztassa az adaptert, amíg a telepítés le nem zajlott és újra nem indította a számítógépet. Ellenkező esetben gondok merülhetnek fel az adapter működésével.*

1. Válassza ki a telepítő nyelvét, jelen esetben a magyart
2. Kattintson a “Tovább” gombra a futtatáshoz
3. Kattintson a “Telepítés” gombra a telepítés megkezdéséhez
4. Indítsa újra a számítógépet, ahogy ezt a telepítő kéri! (Újraindítás nélkül az eszköz helyes működése nem garantált)
5. Újraindítás után csatlakoztassa az IrDA adaptert valamelyik szabad USB portba
6. A telepítést befejeződött, az eszköz készen áll a használatra